



**Stillen ist die effektivste
Gesundheitsvorsorge für Ihr Kind!**

MamaSafe® unterstützt eine lange und gesunde Stillzeit.



Mehr Informationen!

Hier finden Sie ein anschauliches Anwendungsvideo, das einfach und verständlich das richtige Platzieren von MamaSafe® zeigt.



SCAN ME! →



Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit MamaSafe® mitteilen. Einfach eine E-Mail senden an: mama-safe@tapmed.de

MamaSafe®
FÜR EINE LANGE UND GESUNDE STILLZEIT



Pflege und Schutz für stillende Mütter

ISO®
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION

mama-safe@tapmed.de
www.tapmed.de

Telefon 05606 53060-0 · Fax 05606 53060-44

TapMed ✓ Medizintechnik Handels GmbH
Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen

Warum MamaSafe®?

Viele Mütter leiden während der Stillzeit unter wunden Brustwarzen. Im schlimmsten Fall wird das Stillen vorzeitig eingestellt, weil die Schmerzen unerträglich werden. Dabei ist Stillen die effektivste Gesundheitsvorsorge für Ihr Kind. MamaSafe® Brustwarzenschutzringe unterstützen den Heilungsprozess auf natürliche und einfache Weise. MamaSafe® schützt die Brustwarzen vor dem Verkleben mit der Kleidung und lässt die Luft ungehindert zirkulieren.

Zusätzliches Eincremen der wunden Brustwarzen mit einer Fettcreme verhindert Verkrustungen.



Wann wende ich MamaSafe® an?

Im Prinzip können Sie MamaSafe® nicht nur bei entzündeten Brustwarzen verwenden, sondern während der gesamten Stillzeit auch zur Vorbeugung. Die empfindlichen Brustwarzen werden dank MamaSafe® nicht unnötig durch Berührung mit Kleidung oder Still-BH gereizt.

Wie wende ich MamaSafe® an?

Platzieren Sie den MamaSafe® Brustwarzenschutzring so auf der Brust, dass sich die Brustwarze in der Mitte befindet. Die Kennzeichnung der MamaSafe® Ringe hilft dabei, immer denselben MamaSafe® Ring für dieselbe Brust zu verwenden. So werden Kreuzkontaminationen vermieden.



MamaSafe® Ringe können bequem unter dem BH platziert werden und unterstützen eine sichere und schnelle Wundheilung.

Woraus besteht MamaSafe®?

Die MamaSafe® Brustwarzenschutzringe bestehen aus atmungsaktiven und saugfähigen Materialien (Baumwolle und Schaumstoff), die schonend zu Ihrer Haut sind. Sie können ohne Bedenken mit dem Restmüll entsorgt werden. Die MamaSafe® Brustwarzenschutzringe sind paarweise verpackt und mit einer blauen und einer roten Naht gekennzeichnet.

Wo bekomme ich MamaSafe®?

MamaSafe® können Sie direkt und schnell - telefonisch unter: 05606 53060-0 bestellen.



Herstellerhinweis

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir die MamaSafe® Ringe täglich oder je nach Verschmutzungsgrad zu wechseln. Eine Wiederaufbereitung der Brustwarzenschutzringe wird nicht empfohlen!

MamaSafe® wurde mit freundlicher Unterstützung des Krankenhauses Göttlicher Heiland und der Krankenanstalt Rudolfstiftung entwickelt.



EIN UNTERNEHMEN DER VINZENZGRUPPE
Medizin mit Qualität und Seele www.vinzenzgruppe.at

StadT Wien