

## Z-Slider™ – Die Gleitfolie für den Transfer und die Repositionierung von Tieren

Der Z-Slider beugt Schädigungen des Rückens durch das Heben von Tieren vor. Statt dessen kann der tierische Patient mit geringem Kraftaufwand transferiert oder repositioniert werden. Durch das sanfte Gleiten der Folie werden die Haut und das Gewebe des Patienten geschont.



Anwendungsvideo

### Kreuzkontamination vermeiden

Die latexfreie LDPE Folie ist als patientenbezogenes Einmalprodukt vorgesehen.

### Anwendung

Der Z-Slider wird auf eine glatte Oberfläche gelegt. Das Tier wird darauf positioniert (s. Foto). Nun wird das Tier sanft in Pfeilrichtung angeschoben. Die doppelagige Z-Slider Folie gleitet auf sich selbst. Der Patient kann so auf eine angrenzende glatte Oberfläche geschoben werden. Vor der Behandlung sollte der Z-Slider entfernt werden.

### Produktübersicht



2102

#### Z-Slider

1 VE = 2 Rollen à 30 Folien  
990 x 830 mm / Folie



2104

#### Z-Slider

1 VE = 6 Boxen à 10 Folien  
990 x 830 mm / Folie



2104-H-single

#### Wandhalterung

für Art. 2104  
290 x 250 x 60 mm

**Wir sind für Sie da!**

**TapMed** 

TapMed Medizintechnik Handels GmbH  
Gewerbepark 10  
34317 Habichtswald-Ehlen

**Telefon: 05606 53060-0**  
**Fax: 05606 53060-44**  
**E-Mail: [tiergesundheit@tapmed.de](mailto:tiergesundheit@tapmed.de)**

Absender (Stempel):


Abteilung: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner/in: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

- Ich möchte -Produkte bestellen, bitte rufen Sie mich an.
- Ich habe Interesse an einer Erprobung, bitte rufen Sie mich an.
- Ich möchte besucht werden, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

**Wir beraten Sie gern!**



**Beate Nickolai**

Tel. +49 (0) 5606 53060-0  
[beate.nickolai@tapmed.de](mailto:beate.nickolai@tapmed.de)



**Tanja Rosenberger**

Tel. +49 (0) 5606 53060-0  
[tanja.rosenberger@tapmed.de](mailto:tanja.rosenberger@tapmed.de)

