
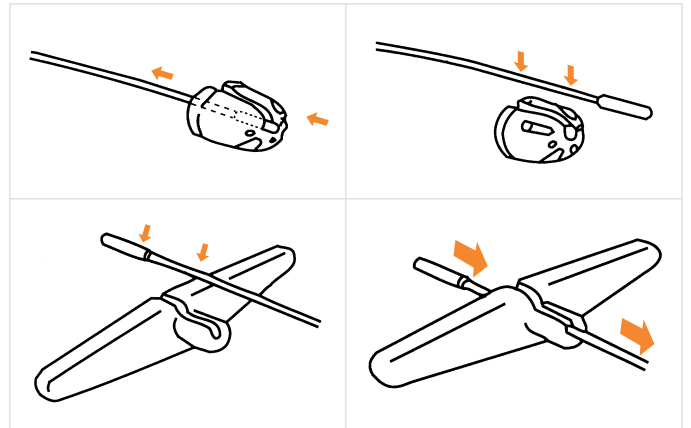


Spezielle Formgebung und Oberflächenbehandlung zur leichteren Einführung und für besseres Gleiten.

Empfehlenswerte Methode für invaginierendes Stripping

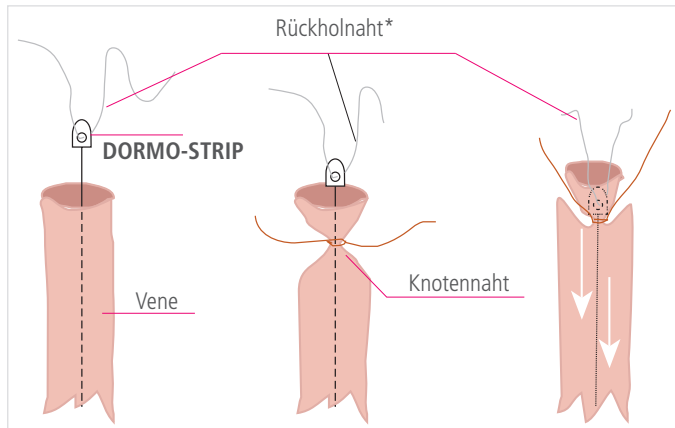


* Falls bei einer Extrahierung durch invagination eine Vene reißt, soll die Strippe durch diese Naht zurückgewonnen werden und dann wird die Extrahierung auf konventionelle Art vorgenommen.

Ein Set besteht aus:

- 2x Kabel mit je 100 cm Länge
(Zugfestigkeit im Mittel 47 kg)
- 3x Kopfstücke
(Durchmesser: 9,5 mm, 12,8 mm, 15,4 mm)
- 1x Handgriff

Durchmesser des Einführers 3,25 mm
Durchmesser des Kabels 1,5 mm

Vollständig aus Polyamid hergestellt
Sterilisiert mit Ethylenoxid

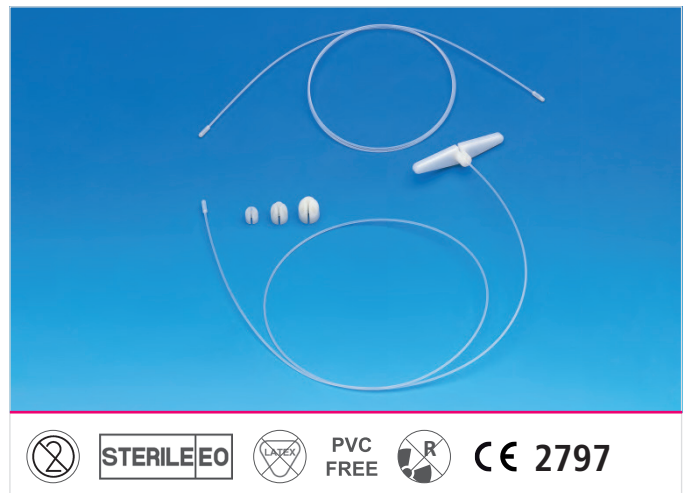

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
DORMO-STRIP-022	Einmal-Venenstripper	Konventionelles Stripping	12 Stück
DORMO-STRIP-025	Einmal-Venenstripper	Invaginierendes Stripping	12 Stück