

# Vac-Pac – Vakuummatte

Zur sicheren Patientenpositionierung  
im OP mittels Unterdruck



51631

51608

51611



Das VAC-PAC ist für eine Vielzahl von Lagerungen besonders gut geeignet z. B.: Trendelenburg, Seitenlagerung, Beachchair-Lagerung oder bei der Lagerung adipöser Patienten. Mittels Unterdruck durch den OP-Sauger kann die Vakuummatratze ideal an die Körperform angepasst werden und bietet eine optimale Druckentlastung bei gleichzeitiger Stabilität der Position des Patienten. Durch eine spezielle Füllung - die verschiedenen großen Kügelchen sind eine Besonderheit des VAC-PAC von Natus - ergibt sich nach dem Absaugen eine druckentlastende Oberflächenvergrößerung.

Die Außenhaut ist hautsympathisch, elastisch und robust zugleich. Spitze Gegenstände sollten nicht in Berührung mit dem VAC-PAC kommen. Ein Reparaturset liegt jedem VAC-PAC bei. VAC-PACs sind nicht einweisungspflichtig, jedoch empfehlen wir eine Präsentation oder Schulung durch unseren Außendienst (kostenfrei).

Für die VAC-PAC's Nr.: 51630, 51631, 51632 und 51640 sind Einmalschutzbezüge separat erhältlich.

### Produktmaterial

- Außenhaut: 20-mil-Polyvinylchlorid-Film (PVC)
- Ventil: Weißes PVC
- Kügelchen im Innern:  
Geschäumtes Polystyrol (Styropor),  
0,023-0,047 mm

### Latexgehalt

VAC-PACs sind latexfrei.

### Leitfähigkeit

VAC-PACs sind nicht leitend.

### Röntgenstrahlendurchlässigkeit

VAC-PACs sind röntgenstrahlendurchlässig.

### Gewährleistung

Einjährige Gewährleistung auf alle Material- und Herstellungsfehler.

### Richtlinienklassifikationen

- VAC-PACs entsprechen den europäischen Richtlinien für Medizinprodukte der Klasse I.
- VAC-PACs tragen das CE-Zeichen. Die Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.

## Vac-Pac – Vakuummatte

### Desinfektion und Reinigung

VAC-PACs sind schnell und einfach mittels Wischdesinfektion zu reinigen. Aufgrund der hohen Anzahl der auf dem Markt existenten Desinfektionsmittel wurde VAC-PAC nicht auf die Verträglichkeit mit den einzelnen Desinfektionsmitteln getestet, sondern auf die Verträglichkeit mit den in den meisten Desinfektionsmitteln enthaltenen Inhaltsstoffen (Phenolharz, Ammoniak, Alkoholgemische). Somit ist die Verwendung der meisten auf dem Markt erhältlichen Desinfektionsmittel empfehlenswert.

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Maße in mm	Stückzahl je VE
51608	Patientenpositionierung VAC-PAC Nr. 8, mit Flügeln	133 x 86	1 Stück
51611	Patientenpositionierung VAC-PAC Nr. 11, U-förmig	41 x 30	1 Stück
51623	Patientenpositionierung VAC-PAC Nr. 23, kleines U, klein	51 x 46	1 Stück
51630	Patientenpositionierung VAC-PAC Nr. 30, kleines U, mittelgroß	90 x 73	1 Stück
51631	Patientenpositionierung VAC-PAC Nr. 31, kleines U, groß	90 x 98	1 Stück
51632	Patientenpositionierung VAC-PAC Nr. 32, kleines U, extra groß	90 x 118	1 Stück
51635	Patientenpositionierung VAC-PAC Nr. 35, T-förmig mit Laschen	71 x 88	1 Stück
51640	Patientenpositionierung VAC-PAC Nr. 40, großes Rechteck	193 x 76	1 Stück
VPC30	Vac-Pac 30 Einmalschutzbezüge		30 Stück
VPC31	Vac-Pac 31 Einmalschutzbezüge		30 Stück
VPC32	Vac-Pac 32 Einmalschutzbezüge		30 Stück
VPC40	Vac-Pac 40 Einmalschutzbezüge		15 Stück
516RS	Reparaturset	Set bestehend aus: 1 Reparaturflicken 1 Absaugadapter 1 Ventildeckel	1 Stück
516-100197-01	VAC-PAC-Adapter		1 Stück
08-5370	PVC-Hand-Vakuum-Pumpe		1 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.