

Schnell und sicher gelagert
mit dem Q2Roller®



Hilfe zur Umlagerung


Das regelmäßige Umlagern bettlägeriger Patienten ist eine zeit- und kraftintensive Herausforderung für Pflegekräfte. Der Q2Roller® von HoverTech macht die laterale Drehung von Patienten effizient und leicht.

ARDS-Lagerung für die verbesserte Beatmung

Lange Liegedauern in Bauchlage verbessern die Sauerstoffzufuhr, bergen aber das Risiko erheblicher Lagerungsschäden. Mikrolagerung in Kurzfristintervallen ist unerlässlich, jedoch personal- und zeitintensiv. Der Q2Roller® kann mühelos von nur 1 Pflegekraft bedient werden, ist individuell für jeden Patientenbedarf einstellbar, in Notfallsituationen innerhalb kürzester Zeit entleert und vereint 180°- und 135°-Lagerung.

Produkteigenschaften

Der Q2Roller® besitzt 2 separat befüllbare Luftkammern. Diese werden mithilfe des AirSupply Gebläses individuell befüllt, um eine optimale Position für das Wohlbefinden des Patienten zu erreichen und ihn vor Druck zu schützen.

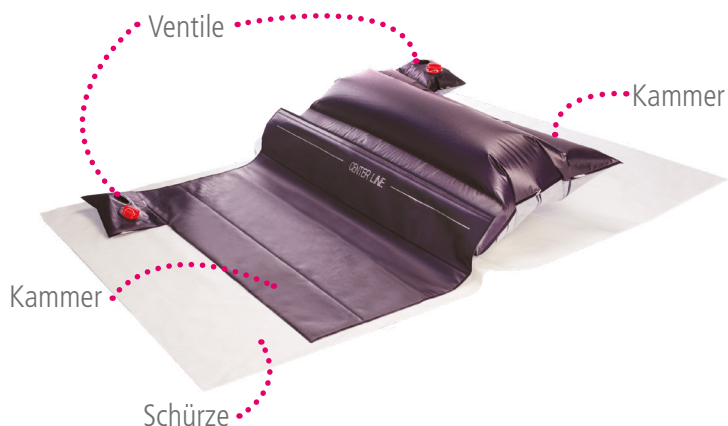

Der Q2Roller® schützt das Pflegepersonal durch Vermeidung von Kraftaufwand.

Der Q2Roller® schützt den Patienten, weil Reibungs- und Scherkräfte vermieden werden.

Vorteile des Q2Roller®

- Patientenindividuelles Produkt, kann dauerhaft im Bett belassen werden
- Schnelle Bedienung und Positionsveränderung durch nur 1 Pflegekraft möglich
- Hygienisches Produkt, wird mit 5 Einmalschutzauflagen geliefert
- Kein Heben von Patienten nötig
- Verhindert Scherkräfte, Druckbelastung und Reibung
- Kontrollierte Handhabung in für jede Situation angemessener Geschwindigkeit

Produktmerkmale

- Polypropylen
- RF verschweißte Nähte
- Latexfrei
- Maße: Kammern: 112 x 112 cm, Schürze: 112 x 183 cm
- Maximales Patientengewicht: 272 kg
- Verpackungseinheit: 5 Stück pro Box inkl. jeweils 5 Einmalschutzauflagen
- Passendes Gebläse: HTAIR2300

Reinigung, Wartung und Anwendung

- Der Q2Roller® ist ein Einpatienten-Modell. Wenn das Produkt verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem keimabtötenden Reiniger ab
- Luftstau am Lufteinlass des Gebläses (HTAIR2300) ist zu vermeiden
- Nutzen Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Gebrauch und entsprechend der Gebrauchsanweisung
- VORSICHT VOR STROMSCHLAG: das Gebläse nicht öffnen

Zubehör

- Einmalschutzauflagen können separat bestellt werden (Art-Nr. HTR-CHX-CASE)
- Saugfähige, atmungsaktive Materialien halten Feuchtigkeit ab und helfen das Mikroklima der Patienten zu kontrollieren
- Selbstklebende Streifen halten die Schutzauflage sicher an ihrem Platz

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	VE
HTR-200	Q2Roller, pneumatische Patientenpositionierhilfe - Einpatientenmodell	aus Polypropylenfaser mit verschweißten Nähten, Tragfähigkeit 272 kg, Maße: 122 x 112 cm, Schürze 112 x 183 cm Passendes Gebläse: Art. HTAIR2300 inkl. jeweils 5 Einmalschutzauflagen	5 Stück
HTR-CHX-CASE	Einmalschutzauflage für Q2Roller	atmungsaktiv, 99 x 99 cm, zu verwenden mit Q2Roller und HTAIR2300 AirSupply	50 Stück
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse	Luftzufuhrgerät für HoverMatt Pneumatisches Umbettungs-System HoverJack Pneumatischer Patientenlifter Q2Roller - pneumatische Patientenpositionierhilfe	1 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.