

Schnell-Info Armausleger



Spezial-Armausleger - schnelle und sichere Einstellung des Armauslegers Dank Zentralspanngriff mit Schnellfixierung.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Max. Belastbarkeit	Inhalt VE
4646.05	Armausleger lateral Armauflage: anatomisch geformtes visko-elastisches Polster Eigengewicht ca. 3,9 kg Lieferung inkl. Kloben	6 kg*	1 Stück
6646.01	Armausleger lateral Armauflage: anatomisch geformtes visko-elastisches Polster Eigengewicht ca. 4,3 kg Lieferung inkl. Kloben	10 kg*	1 Stück
4670.03	Armausleger vertikal Armauflage: anatomisch geformtes visko-elastisches Polster Eigengewicht ca. 4 kg Lieferung ohne Kloben**	4 kg*	1 Stück
6656.02	Armausleger vertikal Armauflage: anatomisch geformtes visko-elastisches Polster Eigengewicht ca. 5,4 kg Lieferung ohne Kloben**	6 kg*	1 Stück

* Maximale Belastbarkeit des Gelenkarmes bei maximaler Ausladung (gestreckt)

** Empfohlen werden die Kloben 10-304, 10-305 und 5.750

- Armlagerungssystem zur Montage an der Euroschiene von OP-Tischen
- Schnellfixierung von drei Gelenken mit nur einem Zentralspanngriff
- Sehr leicht zu positionieren
- Federklemme an der Unterseite des Armpolsters zur Befestigung eines Gurtes: Der Arm des Patienten muss sicher auf dem Armpolster befestigt werden. Es wird die Verwendung spezieller Gurte oder Klettbinden zur Fixierung auf dem Polster empfohlen.
- Reinigung und Desinfektion:
 - o Metallische Oberflächen: es darf nur manuell gereinigt werden. Zur Entfernung von Verunreinigungen sollte eine weich Bürste oder ein sauberes Tuch verwendet werden. Zur Reinigung sind schwach alkalische Allzweckreiniger geeignet. Zur Desinfektion sind alle Flächen-desinfektionsmittel geeignet, die kein Chlor oder chlorabspaltende Verbindungen enthalten.
 - o Armpolster: Zur Reinigung können Flächendesinfektionsmittel mit Wirkstoffkombinationen Aldehyd, quaternäre Verbindungen und Guanidin Derivate verwendet werden.