

## CrossSeat - Querbettessel für die Frühmobilisation



### Sichere und effiziente Mobilisation

Der CrossSeat von HSO ist vielseitig einsetzbar und dient einer optimalen und sicheren Sitzposition. Er bietet das höchste Maß an Schutz für den Patienten und entlastet das Pflegepersonal bei der täglichen Arbeit. Der CrossSeat kann an jedem handelsüblichen Krankenhaus- oder Pflegebett schnell befestigt werden und ist nach dem Ablassen der Luft klein und handlich verstaubar.

### HSOCS02 – CrossSeat

1 Set bestehend aus:  
CrossSeat (Sitzfläche 55 x 50 cm, Rückenpolster 68 cm hoch), 1 Tasche, Fixationselemente, 1 Reparaturkit

### HSOCS01 – CrossSeatTable

1 Set bestehend aus:  
CrossSeatTable, 1 Hand-Luftpumpe für Tisch, Fixationselemente, 1 Reparaturkit

### Anwendungshinweis

Der CrossSeat aus PVC wird einfach über den auf Station vorhandenen Druckluftanschluss oder mit separat zu beziehender Pumpe befüllt. Die Luft-Füllmenge (Härtegrad) kann über das Ventil an die Bedürfnisse der zu pflegenden Person angepasst werden. Bitte vor Nutzung darauf achten, dass der CrossSeat durch Gurte am Krankenhausbett befestigt ist. Mit Hilfe eines Auslassventiles kann die Luft auch rasch wieder entweichen und der CrossSeat kann bequem und platzsparend verstaubt werden.

Der CrossSeatTable aus Drop-Stitch und PVC kann ausschließlich mit der Hand-Luftpumpe aufgeblasen werden. Er ist einfach am CrossSeat und Patientenbett zu befestigen.

Wir empfehlen die Nutzung des CrossSeat in Kombination mit ThoraXsafe\*, um den Brust- und Beckenbereich zu stabilisieren.

### Reinigung

Der CrossSeat kann abgewaschen bzw. mit einem feuchten oder nassen Tuch auch mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln einfach gereinigt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Die Befestigungsgurte können zusätzlich bei 60 °C gewaschen werden.

Wir empfehlen zur Schonung der Waschmaschine und der Gurte Wäschesäcke bzw. Wäschenetze zu verwenden.

### Gewährleistung

Die Garantie auf herstellungsbedingte Fehler beträgt 2 Jahre.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOCS02	CrossSeat 55 x 50 cm	① 1 Set (1 CrossSeat, 1 Tasche, Fixationselemente, 1 Reparaturkit)
HSOCSFIX02	CrossSeat Fixationselemente	1 Beutel mit 3 Gurten
HSOCS01	CrossSeatTable - Aufblasbarer Tisch	② 1 Set (1 CrossSeatTable, 1 Hand-Luftpumpe für Tisch, Fixationselemente, 1 Reparaturkit)
HSOCSFIX	CrossSeat Fixationselemente	1 Beutel mit 3 Gurten
HSOCSREP	CrossSeat Reparaturkit	1 Set
HSOHS-318	Elektrische Luftpumpe für CrossSeat	1 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.