

Schnellinfo

Flat Slide Sheet – Gleittuch

Sicheres und einfaches
Umlagern von Patienten



Mit dem extrem gleitfähigen Flat Slide Sheet können Patienten schnell, sicher und mit geringem Kraftaufwand umgelagert, bewegt, gedreht und sogar aufgesetzt werden.

Vorteile

- Mindert den Kraftaufwand der Anwender, um die Patienten einfach und sicher zu bewegen
- Hervorragende Gleitfähigkeit
- Vielseitig und flexibel einsetzbar
- Reißfest
- Latexfrei
- Hygienisches, patientenbezogenes Einwegprodukt
- Röntgenstrahlendurchlässig

Material

- Öko-zertifiziertes, latexfreies und reißfestes Gewebe



Anwendungshinweis / Handhabung

Der Patient ist während der Umlagerung mit dem Flat Slide Sheet vor ungewolltem Rutschen zu sichern. Platzieren Sie das Flat Slide Sheet entsprechend dem üblichen klinisch-pflegerischen Umgang unter dem Patienten. Das Flat Slide Sheet ist hierbei einmal in der Mitte zu falten, damit zwischen den aufeinanderliegenden Hälften die Gleitfläche entsteht. Liegt der Patient auf dem Flat Slide Sheet, kann er mit geringem Kraftaufwand bewegt werden. Das Gleittuch hilft, Scherkräfte bei dem Umlagern von Patienten zu vermeiden. Nach Gebrauch kann das Gleittuch unter dem Patienten einfach durch Einrollen entfernt werden.

Produkte und Artikelnummern

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Maße in cm	Stückzahl je VE
DF570200X50SP	Flat Slide Sheet - Gleittuch	70 x 200	50 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.