
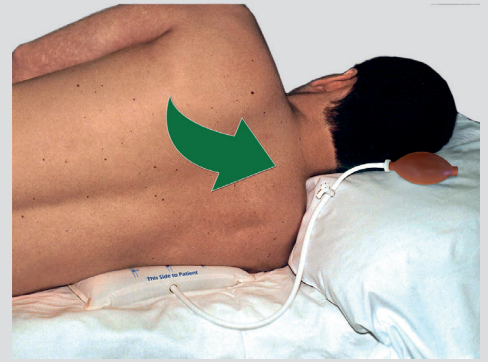


Schnell-Info Shoulder-Float

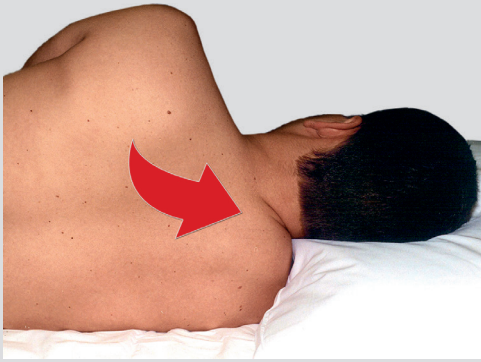

Shoulder-Float ist ein aufblasbares Schulter-Positionierkissen. Es dient zur Entlastung der Schulter und des Kopfes in Seitenlage. Häufig wird es bei Hüft-TEP's oder Niereneingriffen verwendet.

Produktverwendung:

Das Positionierkissen wird unter dem Oberkörper, unterhalb der Achselhöhle platziert und mit Hilfe des Pumpballs aufgeblasen. Abknicken und Aufliegen der Schulter wird somit verhindert. Intraoperative Veränderungen sind durch Hinzufügen oder Ablassen von Luft möglich. Zur Verwendung mittels Tourniquet ist ein Adapter erhältlich.

Materialbeschaffenheit:

Nylon, latexfrei

Reinigungshinweise:

Shoulder-Float wird mittels Wischdesinfektion mit:

- Mildem Reinigungsmittel oder 70% Isopropylalkohol
- Quarternärem Reinigungstuch
- 0,5%iger Bleichlösung

gereinigt. Lassen Sie Shoulder-Float bis zur nächsten Anwendung gründlich trocknen.

Warnhinweise:

Bei Verschmutzung, Verfärbung oder Beschädigung ist Shoulder-Float gemäß der Vorgaben des Krankenhauses zu entsorgen.

Artikelnummer	Artikebezeichnung	Maße in cm	Inhalt je VE
SF10	Shoulder-Float	37 x 26	10 Stück
TQ01	Tourniquet Box Adapter (gerade)		1 Stück
TQY1	Tourniquet Box Adapter (Y-Form)		1 Stück