



Der Wilson-Rahmen bietet eine komfortable und stabile Methode Patienten während Laminektomie, Dekompressionsverfahren, Bandscheibenoperationen und Mikrodiskektomie in Pronation mit gebeugter Wirbelsäule zu lagern.

Produktverwendung:

Der Wilson-Rahmen wird mit zwei Personen im Roll-Behälter auf dem OP-Tisch platziert. Der Behälter wird so ausgerichtet, dass die Rollen nach oben und zum Kopfende des Tisches weisen und der Behältergriff zum Fußende liegt. Der Roll-Behälter wird entfernt und der Wilson-Rahmen mit Hilfe des Sicherheitsgurtes am OP-Tisch befestigt. Die Kurbel wird aus der Verankerung im Sockel des Wilson-Rahmens genommen und links neben dem Typen-Schild eingeführt. Das Ende der Kurbel wird mit dem Stab verbunden, und durch drehen der Kurbel wird der Wilson-Rahmen auf die niedrigste Position gebracht. Nun wird der Patient auf dem Wilson-Rahmen gelagert.

Materialbeschaffenheit:

Der Wilson-Rahmen besteht aus Kohlenstoffverbundmaterial und schlagfestem Kunststoff. Er ist strahlendurchlässig, wodurch der Einsatz eines C-Bogens ermöglicht wird.

Anwendungshinweise:

- Aus Sicherheitsgründen muss der Wilson-Rahmen von zwei Personen aufgebaut und bedient werden.
- Platzieren Sie den Wilson-Rahmen immer nur auf ebener Fläche und mittig auf dem OP-Tisch
- Es ist sicherzustellen, dass die Gurtplatzierung beim Biegen des Wilson-Rahmens nicht die Auflagenbewegung behindert.
- Es wird empfohlen Einmal-Schutzbezüge zum Schutz der Polster zu nutzen. Die Schutzbezüge sind separat erhältlich.

Reinigungshinweise:

- Die Oberflächen nach jedem Gebrauch mit einem quartären Desinfektionsmittel reinigen
- Mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken wischen
- Stellen Sie sicher, dass das Reinigungsmittel als Oberflächendesinfektionsmittel ausgewiesen ist
- Das Produkt nicht zu feucht säubern und nicht tauchen, vernebeln oder bedampfen
- Die Verwendung von Alkohol, Bleichmitteln oder sonstigen hochkonzentrierten Chemikalien ist zu vermeiden

Warnhinweise:

- Vergewissern Sie sich vor jeder Patientenlagerung, dass der Wilson-Rahmen fest am Tisch fixiert ist
- Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Wilson-Rahmen
- Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Patientenpositionierung (Kopf, Arme Beine etc.)
- Der Patient muss auf dem Wilson-Rahmen stets durch einen Sicherheitsgurt gesichert sein
Kontrollieren Sie immer die Auflagefläche des Patienten

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten!

Artikel-Nr.	Lieferumfang
5319E	Wilson-Rahmen
5322PV	Patientenlagerungsset bestehend aus: 1 ProneView Polster für Erw., 2 Armpolster, 1 Schaumstoffschutz, 2 Schutzhüllen für Tempur-Polster, VE6
5322	Patientenlagerungsset bestehend aus: 1 GentleTouch Polster für Erw., 2 Armpolster, 1 Schaumstoffschutz, 2 Schutzhüllen für Tempur-Polster, VE6
5324-21	Schutzhüllen für Tempur-Polster, VE12